


## アネロイド血圧計 No. 555

### 【禁忌・禁止】


1. ヒト以外には使用しないで下さい。
2. 天然ゴムアレルギーの方は使用しないで下さい。
3. 絶対に分解、改造しないで下さい。  
[故障の原因になります。]
4. 10mmHg 以上加圧した状態で 10 分以上患者に装着しないで下さい。
5. チューブ間にルアーロックコネクタを使用しないで下さい。  
加圧システムが血管内輸液システムに(不注意で)接続される可能性があり、空気が血管内に送気される可能性があります。
6. メーターは滅菌しないで下さい。
7. 腕帯、送気球、バルブ、チューブは加熱又は蒸気による滅菌はしないで下さい。

### 【形状・構造及び原理等】

アネロイド血圧計は、下記の部分から構成されております。

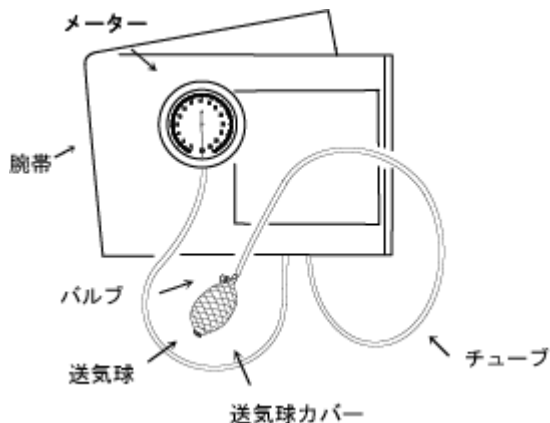

らせん状ぜんまいによって直接指示針を回転させる構造になっています。

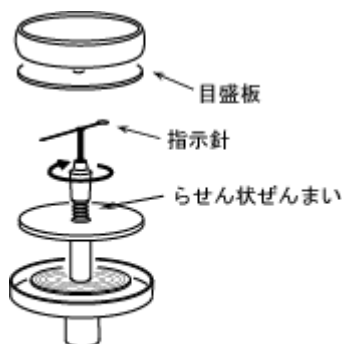

【原理図】

### 【使用目的、効能又は効果】

別途用意の聴診器により、血管音（コロトコフ音）を聴取し、最高血圧値と最低血圧値を読み取り、血圧を測定します。

測定範囲 : 20~300mmHg

### 『使用目的、効能又は効果に関連する使用上の注意』

- 血圧測定時、圧力を加えない時に指針が楕円マークの外にあるものは使用しないで下さい。正確な圧力値が読み取れません。
- 300mmHg 以上の加圧をしないで下さい。
- 必要以上に腕帯で腕を締め付けしないで下さい。

### 【品目仕様等】

- ◆ メーター : サイズ: (径)6×(厚さ)3.4  
(ポンパ-含む) 材 質: ポリカーボネート樹脂  
バンパー(合成ゴム)
- ◆ 腕 帯 : 材 質: 綿又はナイロン
- ◆ バルブ : 材 質: 真鍮(クロームメッキ)
- ◆ 送気球 : サイズ: φ4.3 (径)×(長さ)11  
材 質: ラテックスゴム
- ◆ 送気球カバー: 材質: ナイロン
- \* ◆ チューブ : 材 質: ラテックスゴムまたはPVC


※ 単位は cm

### 【操作方法又は使用方法等】

1. 血圧の測定はアネロイド血圧計と聴診器の併用で行なわれます。
2. 腕帯を患者の腕に巻き、排気バルブを締め、送気球により加圧し、メーターの指針を予想最高血圧値より少し高めにし、排気バルブを緩めて血管音の聴こえ始めた時点と聴こえ終えた時点により最高血圧値及び最低血圧値を測定します。
3. 予想最高血圧値より除々に指針を下げ、規則的な血管音が聴こえ始めたときの指針の指示値が最高血圧値です。
4. さらに指針が下がるにつれて血管音が最後に聴こえた時点の指針の指示値が最低血圧値です。

### (組立方)

1. 腕帯のループバンドにメーターの背面のクリップを通して下さい。

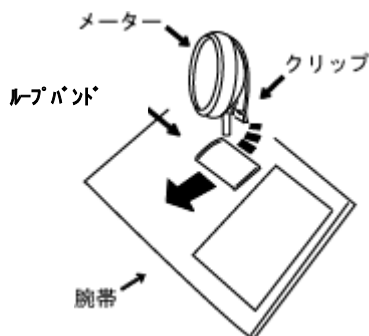

2. クリップをロック位置まで押して下さい。



#### 【使用上の注意】

(本体)

1. 使用前はメーターの指針が正しく楕円の位置にあるか確認して下さい。  
もし、楕円の位置に指針が示されていない場合、正しく血圧を測定することは出来ません。
2. メーターが汚れた時は、柔らかい布でからぶきして下さい。  
汚れがひどい時は、薄めた中性洗剤をつけた布で汚れを落とした後、からぶきして下さい。
3. メーターに落下など故意に衝撃を加えないで下さい。

(腕帯)

1. 腕帯のブラダー及びチューブ、送気球に空気漏れがないか確認して下さい。
2. 腕帯は加圧状態で長時間放置しないで下さい。
3. 使用していない時は、腕帯内の空気を抜いて下さい。
4. 腕帯をあまり小さく畳んだり、チューブを折り曲げたままにしないで下さい。
5. チューブの中に異物が入らないように留意して下さい。

(その他)

1. 患部で血圧測定をしないで下さい。二次感染等発生の可能性があります。
2. 血圧を測定する時には、血管音を聴くための聴診器が必要です。
3. 専用部品以外は取り付けしないで下さい。

#### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 保管温度：-20～60℃
2. 保管湿度：RH85%以下
3. 保管場所：急激な温度変化のある所、極端に高温や低温になる所、衝撃・振動を受ける所、化学薬品の保管場所やガスの発生する所は避けて下さい。

#### 【保守・点検に係る事項】

1. メーター、送気球、バルブは湿らせた布又はアルコールで拭いて下さい。
2. 腕帯が汚れた場合、湿らせた布で拭き取るか又は汚れがひどい時はブラダー、メーター、送気球を取り外し中性洗剤で手洗いして下さい。
3. 送気球カバーが汚れた場合、中性洗剤で手洗いして下さい。
4. 修理を依頼される時又は異常のある場合はお買い求めの販売店にお申し出下さい。

#### 【包装】

1 個/箱

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

(製造販売業者及び製造業者)

ケンツメディコ株式会社

〒367-0206

埼玉県本庄市児玉町共栄 5 5 2 番地 1

TEL 0495-71-1001 FAX 0495-72-6716

URL-<http://www.kenzmedico.co.jp>

(製造業者)

ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

〒101-0054

東京都千代田区神田錦町 3-15 錦精社ビル 6 F