



医療器具用酵素洗剤

インスルネットEZ

1L

5L

Cleaning Agents for Medical Equipment



Instrunet EZ 1L



Instrunet EZ 5L

KENZMEDICO

内視鏡・手術器具専用酵素洗剤 蛋白質・脂質・炭水化物を酵素で分解! 驚きの洗浄力を発揮します。

浸漬

超音波
洗浄機

中性

発泡性



インスルネットEZ 1L (1.03kg)
メーカー希望小売価格 ¥3,500(税別)



インスルネットEZ 5L (5.15kg)
メーカー希望小売価格 ¥12,000(税別)

■特徴

①強力な分解作用

特殊酵素の働きで、ファイバースコープ、硬性内視鏡、生検鉗子等の処置具、その他手術器具に付着した血液、粘液、蛋白、脂肪、炭水化物などの落ちにくい汚れに対して強力な分解作用を発揮します。

特に、ブラッシングの行き届かないチャンネル内、送気送水口、鉗子起立溝などに付着した汚れも短時間浸漬するだけで取り除くことができます。

②器具に優しい洗浄剤

中性洗剤ですので、素材に対する腐食性がなく、ほとんどの器具にご使用いただけます。内視鏡の金属、ゴム、波形チューブ、プラスチックなどにもダメージを与えることはありません。

③簡単なすすぎ

簡単なすすぎで残留物も残らず、チャンネル内のつまりも解消します。

※本製品には消毒・滅菌効果はありません。

●使用方法

浸漬洗浄の場合

使用濃度

インスルネットEZ 50ccに対して温水または水6L(約0.8% 120倍)

浸漬時間

汚れが液状の場合：5分～10分
汚れが固形化している場合：30分以上

すすぎ

洗浄後、水道水・蒸留水・滅菌水等ですすぎます。

超音波洗浄機の場合

使用濃度

洗浄1回ごとの使用量および洗浄時間は、それぞれ洗浄機メーカーの指定量および時間に合わせてご使用ください。

◆インスルネット1Lのボトルには液の計量がしやすいように目盛が付いています。ボトルを両手で押すと、液が目盛器内に入っています。

◆インスルネット5Lには、プッシュポンプをご用意しています。ご希望の際は取扱店まで。

発売元

ケンツメディコ株式会社

本 社 〒367-0206 埼玉県本庄市児玉町共栄552番地1
TEL(0495)71-1001 FAX(0495)72-6716
URL <http://www.kenzmedico.co.jp>

輸入元

ドクタージャパン株式会社

〒162-0825 東京都新宿区神楽坂1-1
TEL(03)3513-8766 FAX(03)3513-8226
Manufactured by ANIOS(France) for DISTRIBUTOR

取扱店