

機械器具 54 医療用捲綿子
一般医療機器 医科用捲綿子 10172000

成毛式ソラコットン小2 K70-7102

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、軸の先端に綿球がついた滅菌済み医療用綿棒です。

綿球部の材質：コットンとレーヨンの混紡

軸部の材質：紙製

寸法：全長 303mm/綿球径 5.6mm/軸の直径 3.2mm


【使用目的、効能又は効果】

身体の一部及び体内に、薬剤を塗布または治療を適用すること、または検査のための試料を採取することを目的とした器具である。

本品は成毛式胸腔鏡手術器具の成毛式エンドフィンガー（K60-7121）、又は成毛式コットンフィンガー（K70-7111）専用の綿棒として使用する。

【操作方法又は使用方法等】

使用する直前に本品の包装を開け、軸（シャフト）部強化用パイプ成毛式エンドフィンガー又は成毛式コットンフィンガーに差し込み、固定して使用します。

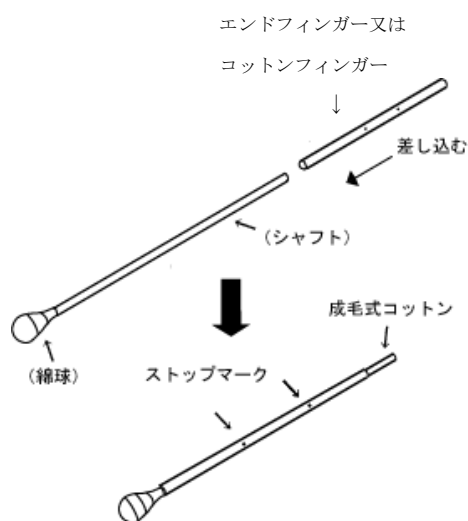

【使用上の注意】

- 1) 本品の軸は紙をロール状に巻いて形成されています。軸折れ防止のため必ず軸（シャフト）部強化用のパイプに差し込み、固定してから使用して下さい。
- 2) 本品は滅菌済（EOG 滅菌）ですので、個包装に破れや穴などがあつた場合には使用しないで下さい
- 3) 包装を開封した後は速やかに使用して下さい
- 4) 本品の使用は1回限りです。再使用しないで下さい。
- 5) 本品を成毛式エンドフィンガー、コットンフィンガーに差し込む時は、力を入れすぎたり、強く押し下したりして綿棒の軸を折らないようにご注意ください。
- 6) 本品を使用の際は過度な力をかけないように、また十分修熟した人の指示のもとに実施して下さい。
- 7) 本品に破損や折れ曲がり、汚れなどがあつた場合には使用しないで下さい。
- 8) 使用後は感染防止のために、感染性廃棄物の処理規定に従って廃棄して下さい。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵方法：水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け清潔な場所に保管して下さい。

小児の手の届かないところに保管して下さい。

使用期限：容器又は被包に記載してあります。

[自己認証（社内データ）による]

使用期限が切れたものは使用しないでください。

【包装】

5本×10袋入/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：日本綿棒株式会社

〒360-0212 埼玉県熊谷市江波 412

TEL 048-588-3521

販売元：ケンツメディコ株式会社

〒367-0206 埼玉県本庄市児玉町共栄 552-1

TEL 0495-71-1001

お問合せ窓口 TEL 03-3573-1884

機械器具 54 医療用捲綿子
一般医療機器 医科用捲綿子 10172000

成毛式ソラコotton小4 K70-7106

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、軸の先端に綿球がついた滅菌済み医療用綿棒です。

綿球部の材質：コットンとレーヨンの混紡

軸部の材質：紙製

寸法：全長 303mm/綿球径 6.4mm/軸の直径 3.2mm


【使用目的、効能又は効果】

身体の一部及び体内に、薬剤を塗布または治療を適用すること、または検査のための試料を採取することを目的とした器具である。

本品は成毛式胸腔鏡手術器具の成毛式エンドフィンガー（K60-7121）、又は成毛式コットンフィンガー（K70-7111）専用の綿棒として使用する。

【操作方法又は使用方法等】

使用する直前に本品の包装を開け、軸（シャフト）部強化用パイプ成毛式エンドフィンガー又は成毛式コットンフィンガーに差し込み、固定して使用します。

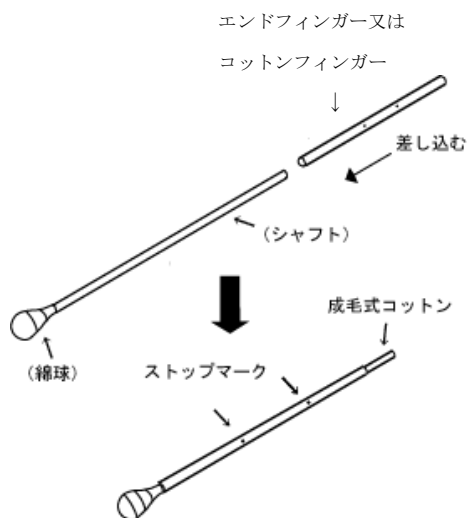

【使用上の注意】

- 1) 本品の軸は紙をロール状に巻いて形成されています。軸折れ防止のため必ず軸（シャフト）部強化用のパイプに差し込み、固定してから使用して下さい。
- 2) 本品は滅菌済（EOG 滅菌）ですので、個包装に破れや穴などがあつた場合には使用しないで下さい
- 3) 包装を開封した後は速やかに使用して下さい
- 4) 本品の使用は1回限りです。再使用しないで下さい。
- 5) 本品を成毛式エンドフィンガー、コットンフィンガーに差し込む時は、力を入れすぎたり、強く押ししたりして綿棒の軸を折らないようご注意ください。
- 6) 本品を使用の際は過度な力をかけないように、また十分修熟した人の指示のもとに実施して下さい。
- 7) 本品に破損や折れ曲がり、汚れなどがあつた場合には使用しないで下さい。
- 8) 使用後は感染防止のために、感染性廃棄物の処理規定に従って廃棄して下さい。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵方法：水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け清潔な場所に保管して下さい。
小児の手の届かないところに保管して下さい。
使用期限：容器又は被包に記載してあります。
[自己認証（社内データ）による]
使用期限が切れたものは使用しないでください。

【包装】

5本×10袋入/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：日本綿棒株式会社

〒360-0212 埼玉県熊谷市江波 412

TEL 048-588-3521

販売元：ケンツメディコ株式会社

〒367-0206 埼玉県本庄市児玉町共栄 552-1

TEL 0495-71-1001

お問合せ窓口 TEL 03-3573-1884

機械器具 54 医療用捲綿子
一般医療機器 医科用捲綿子 10172000

成毛式ソラコotton大2 K70-7101

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、軸の先端に綿球がついた滅菌済み医療用綿棒です。

綿球部の材質：コットンとレーヨンの混紡

軸部の材質：紙製

寸法：全長 304mm/綿球径 12.6mm/軸の直径 3.2mm


【使用目的、効能又は効果】

身体の一部及び体内に、薬剤を塗布または治療を適用すること、または検査のための試料を採取することを目的とした器具である。

本品は成毛式胸腔鏡手術器具の成毛式エンドフィンガー(K60-7121)、又は成毛式コットンフィンガー(K70-7111)専用の綿棒として使用する。

【操作方法又は使用方法等】

使用する直前に本品の包装を開け、軸（シャフト）部強化用パイプ成毛式エンドフィンガー又は成毛式コットンフィンガーに差し込み、固定して使用します。

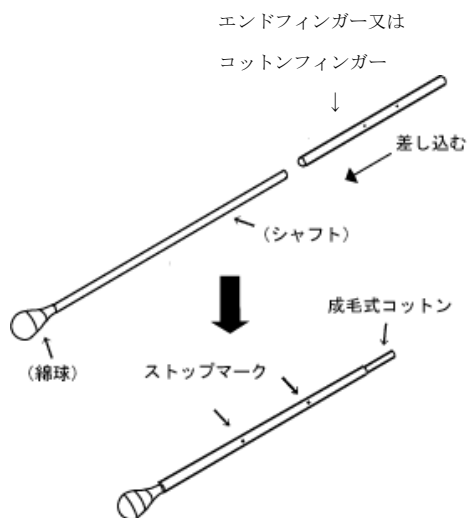

【使用上の注意】

- 1) 本品の軸は紙をロール状に巻いて形成されています。軸折れ防止のため必ず軸（シャフト）部強化用のパイプに差し込み、固定してから使用して下さい。
- 2) 本品は滅菌済（EOG 滅菌）ですので、個包装に破れや穴などがあつた場合には使用しないで下さい
- 3) 包装を開封した後は速やかに使用して下さい
- 4) 本品の使用は1回限りです。再使用しないで下さい。
- 5) 本品を成毛式エンドフィンガー、コットンフィンガーに差し込む時は、力を入れすぎたり、強く押し下したりして綿棒の軸を折らないようご注意ください。
- 6) 本品を使用の際は過度な力をかけないように、また十分修熟した人の指示のもとに実施して下さい。
- 7) 本品に破損や折れ曲がり、汚れなどがあつた場合には使用しないで下さい。
- 8) 使用後は感染防止のために、感染性廃棄物の処理規定に従って廃棄して下さい。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵方法：水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け清潔な場所に保管して下さい。

小児の手の届かないところに保管して下さい。

使用期限：容器又は被包に記載してあります。

[自己認証（社内データ）による]

使用期限が切れたものは使用しないでください。

【包装】

5本×10袋入/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：日本綿棒株式会社

〒360-0212 埼玉県熊谷市江波 412

TEL 048-588-3521

販売元：ケンツメディコ株式会社

〒367-0206 埼玉県本庄市児玉町共栄 552-1

TEL 0495-71-1001

お問合せ窓口 TEL 03-3573-1884

機械器具 54 医療用捲綿子
一般医療機器 医科用捲綿子 10172000

成毛式ソラコotton大4 K70-7105

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、軸の先端に綿球がついた滅菌済み医療用綿棒です。

綿球部の材質：コットンとレーヨンの混紡

軸部の材質：紙製

寸法：全長 303mm/綿球径 12.5mm/軸の直径 3.2mm


【使用目的、効能又は効果】

身体の一部及び体内に、薬剤を塗布または治療を適用すること、または検査のための試料を採取することを目的とした器具である。

本品は成毛式胸腔鏡手術器具の成毛式エンドフィンガー（K60-7121）、又は成毛式コットンフィンガー（K70-7111）専用の綿棒として使用する。

【操作方法又は使用方法等】

使用する直前に本品の包装を開け、軸（シャフト）部強化用パイプ成毛式エンドフィンガー又は成毛式コットンフィンガーに差し込み、固定して使用します。

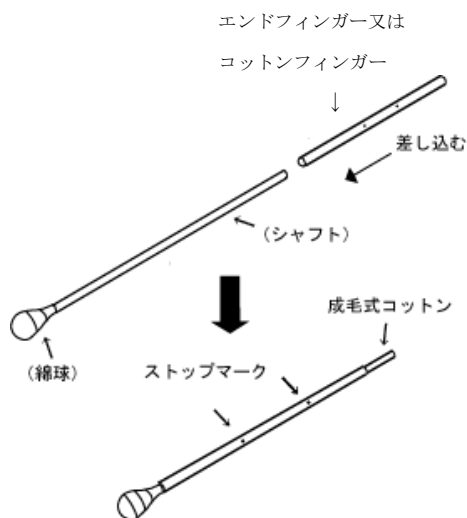

【使用上の注意】

- 1) 本品の軸は紙をロール状に巻いて形成されています。軸折れ防止のため必ず軸（シャフト）部強化用のパイプに差し込み、固定してから使用して下さい。
- 2) 本品は滅菌済（EOG 滅菌）ですので、個包装に破れや穴などがあつた場合には使用しないで下さい
- 3) 包装を開封した後は速やかに使用して下さい
- 4) 本品の使用は1回限りです。再使用しないで下さい。
- 5) 本品を成毛式エンドフィンガー、コットンフィンガーに差し込む時は、力を入れすぎたり、強く押ししたりして綿棒の軸を折らないようにご注意ください。
- 6) 本品を使用の際は過度な力をかけないように、また十分修熟した人の指示のもとに実施して下さい。
- 7) 本品に破損や折れ曲がり、汚れなどがあつた場合には使用しないで下さい。
- 8) 使用後は感染防止のために、感染性廃棄物の処理規定に従って廃棄して下さい。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵方法：水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け清潔な場所に保管して下さい。

小児の手の届かないところに保管して下さい。

使用期限：容器又は被包に記載してあります。

[自己認証（社内データ）による]

使用期限が切れたものは使用しないでください。

【包装】

5本×10袋入/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：日本綿棒株式会社

〒360-0212 埼玉県熊谷市江波 412

TEL 048-588-3521

販売元：ケンツメディコ株式会社

〒367-0206 埼玉県本庄市児玉町共栄 552-1

TEL 0495-71-1001

お問合せ窓口 TEL 03-3573-1884