


ウォッシュブルカフのお手入れ方法(1 / 2)

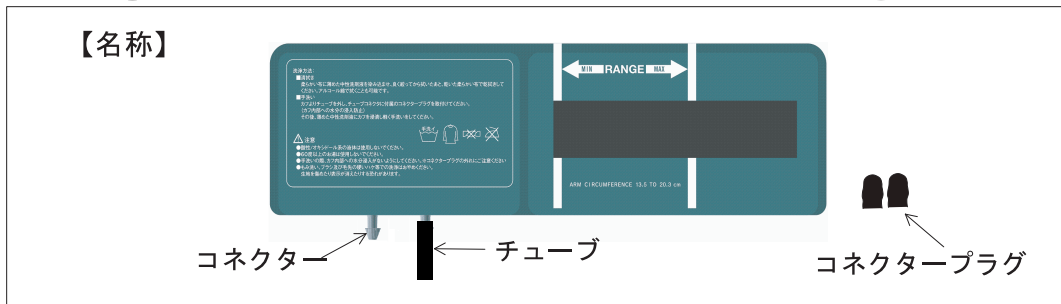


■洗淨する前に

カフ内への水分の侵入を防ぐためにチューブを外して付属の「コネクタープラグ」を取付けてください。


(1) チューブの取外し

右図のように①のところを親指と人差し指で強く押さえながら、チューブを引き抜いてください。

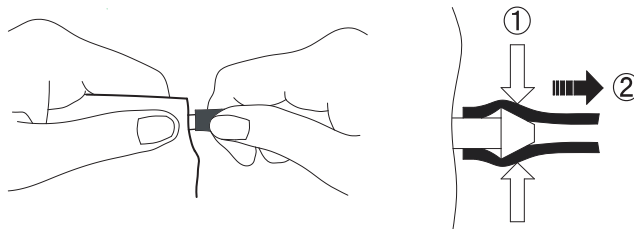

(2) 付属のコネクタープラグの取付け

コネクターの根元をしっかりとつかんでコネクタープラグをしっかりと取付けてください。
※洗淨中の外れ防止のためコネクタープラグはきつめになっています。

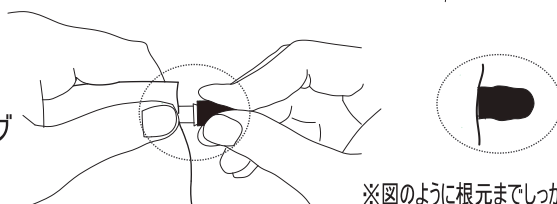

※図のように根元までしっかり押し込まれているか確認してください。

■洗淨方法

●清拭


薄めた中性洗剤液を染み込ませた柔らかい布でカフを拭きます。
次に乾いた柔らかい布で乾拭きをしてください。
アルコール綿で拭いていただくこともできます。

●手洗い

薄めた中性洗剤液にカフを浸漬し軽く手洗いをしてください。
手洗い後は、十分に洗剤を水で洗い流してください。

■干し方

- 洗淨したカフは、右図のように洗濯バサミ等で挟み吊るした状態で陰干ししてください。
- 吊るす向きは、コネクターが下側になるようにしてください。

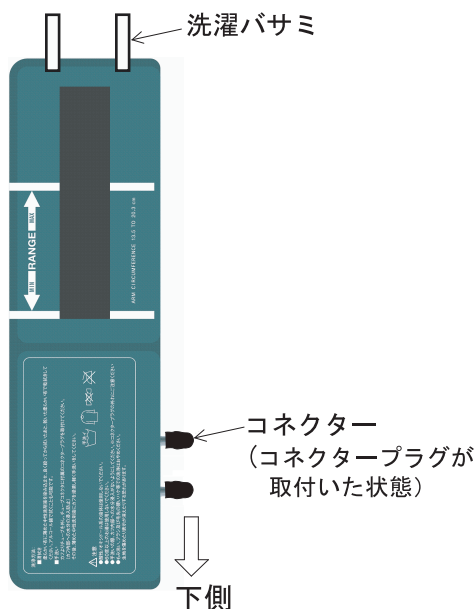

ウォッシュブルカフのお手入れ方法(2 / 2)

■コネクタープラグの取外し

※カフが乾燥してからコネクタープラグを取外してください。

取外しづらい場合には、乾いた布等でコネクタープラグをつかんで取外してください。

■チューブの取付け

コネクタールにチューブを取付けてください。

⊘ [してはいけない]ことを示す。

❗ [必ず守る]ことを示す。

⚠注意

- ⊘ 酸性/オキシドール系の液体は使用しないでください。
- ⊘ 60度以上のお湯は使用しないでください。
- ⊘ 乾燥機、アイロン等による乾燥は絶対におやめください。
※おもて面(1/2)で示すような状態で陰干しにより乾燥させてください。
- ❗ 手洗いの際、カフ内部への水分侵入がないようにしてください。
※コネクタープラグの外れにご注意ください。
- ❗ もみ洗い、ブラシ及び硬いハケ等での洗浄はおやめください。
生地を傷めたり表示が消えたりする恐れがあります。
- ❗ 長時間の浸漬はおやめください。(10分程度を目安にしてください)