

Q. ウォッシュブルカフを洗濯機で洗っても大丈夫ですか？

A. ウォッシュブルカフは手洗いを推奨しており、洗濯機の使用は推奨していません。
社内実験データがございますので、下記のデータをご覧ください。

1.目的 ウォッシュブルカフの洗濯時、洗濯後の残留水分量の試験

2.方法 大型洗濯機（コインランドリー）にウォッシュブルカフを入れ、中性洗剤で洗濯を行う。
重量を測定し、比較を行う。

3.手順 ①洗濯前・洗濯後・乾燥後のウォッシュブルカフの重量を測定する。
洗濯後の重量から洗濯前の重量を引き、水分含有量を調べる。
乾燥後の重量から洗濯前の重量を引き、水分含有量を調べる。
②乾燥後のウォッシュブルカフを切り開き、目視により水分の有無を確認する。



4.結果 ①水分含有量

| | 洗濯前 | 洗濯後 | 水分量 (洗濯後) | 乾燥後 | 水分量 (乾燥後) |
|----|------|------|--------------|------|--------------|
| LL | 11.4 | 13.2 | 1.8 | 11.4 | 0 |
| L | 6.55 | 7.4 | 0.85 | 6.55 | 0 |
| M | 5.7 | 6.15 | 0.45 | 5.7 | 0 |
| S | 2.3 | 2.55 | 0.25 | 2.3 | 0 |
| SS | 1.45 | 1.6 | 0.15 | 1.45 | 0 |

単位：g

②ウォッシュブルカフ内部



乾燥後、内部を切り開き確認。内部に水分は無し。

5.結論 結果より、洗濯を行うと水分を含むが、乾燥させることで元の重量にもどる。