

適切な洗浄をサポートします。



医療器具用洗浄剤

Cleaning Agents for Medical Equipment



Instrunet EZ

Instrunet EZ 5ℓ

Instrunet EZ Foam

Instrunet JET

発売元
ケンツメディコ株式会社
本 社 〒367-0206 埼玉県本庄市見玉町共栄552番地1
TEL(0495)71-1001 FAX(0495)72-6716
URL <http://www.kenzmedico.co.jp>

取扱店

輸入元
ドクタージャパン株式会社
〒162-0825 東京都新宿区神楽坂1-1
TEL(03)3513-8766 FAX(03)3513-8226
Manufactured by INIBSA(Spain) for DISTRIBUTOR

※商品の仕様は予告なく変更させていただくことがあります。

1502(3)OY28

KENZMEDICO

浸漬

超音波
洗浄機

中性

発泡性

内視鏡・手術器具専用酵素洗剤 蛋白質・脂質・炭水化物を酵素で分解! 驚きの洗浄力を発揮します。



インスルネットEZ 1ℓ (1.03kg)

メーカー希望小売価格 ¥3,500(税別)



インスルネットEZ 5ℓ (5.15kg)

メーカー希望小売価格 ¥12,000(税別)

■特徴

①強力な分解作用

特殊酵素の働きで、ファイバースコープ、硬性内視鏡、生検鉗子等の処置具、その他手術器具に付着した血液、粘液、蛋白、脂肪、炭水化物などの落ちにくい汚れに対して強力な分解作用を発揮します。

特に、ブラッシングの行き届かないチャンネル内、送気送水口、鉗子起立溝などに付着した汚れも短時間浸漬するだけで取り除くことができます。

②器具に優しい洗剤

中性洗剤ですので、素材に対する腐食性がなく、ほとんどの器具にご使用いただけます。内視鏡の金属、ゴム、波形チューブ、プラスチックなどにもダメージを与えることはありません。

③簡単なすすぎ

簡単なすすぎで残留物も残らず、チャンネル内のつまりも解消します。

※本製品には滅菌効果はありません。
※消毒剤との併用はできません。

●使用方法

浸漬洗浄の場合

使用濃度

インスルネットEZ 50ccに対して温水または水6L(約0.8% 120倍)

浸漬時間

汚れが液状の場合：5分～10分
汚れが固形化している場合：30分以上

すすぎ

洗浄後、水道水・蒸留水・滅菌水等ですすぎます。

超音波洗浄機の場合

使用濃度

洗浄1回ごとの使用量および洗浄時間は、それぞれ洗浄機メーカーの指定量および時間に合わせてご使用ください。

- ◆インスルネット1Lのボトルには液の調整がしやすいように25ccと50ccの目盛が付いています。容器を両手で押すと、液が目盛器内に入ります。
- ◆インスルネット5Lには、プッシュポンプをご用意しています。ご希望の際は取扱店まで。

予備洗浄

中性

フォーム
タイプ

血液などの汚れの乾燥・凝固を防止できる、
フォームタイプの酵素洗剤です。

乾燥防止
&
酵素洗浄

インスルネットEZ フォーム 750ml

メーカー希望小売価格 ¥2,500(税別)



■特徴

①強力な分解作用

血液、粘液、蛋白、脂肪、炭水化物などの落ちにくい汚れに対して強力な分解作用を発揮します。予備洗浄に使用することで本洗浄での洗浄効果が上がります。

②フォームタイプ

特殊なフォームが器具の表面に密着、血液などの汚れを分解し、汚れの乾燥・凝固を防止します。フォームが噴射箇所を確認を容易にします。

③器具にやさしい洗剤

素材に対する腐食性がなく、ほとんどの器具にご使用いただけます。

●使用方法

- ・使用後の器具に直接スプレーしてください。
- ・使用後の器具にできるだけ速やかにムラなくスプレーしてください。
- ・スプレーした医療器具は、本洗浄前に予備洗浄(すすぎ)機能のある自動洗浄機でしたら、そのまま投入できます。

※本製品には滅菌効果はありません。
※消毒剤との併用はできません。

浸漬

超音波
洗浄機自動洗浄機
(ウォッシャー
ディスインフエ
クターを除く)

中性

超低泡性



インスルネットJET 5ℓ (5.15kg)

メーカー希望小売価格 ¥12,000(税別)

自動洗浄機用に開発された超低泡性酵素洗剤です。

■特徴

①強力な分解作用

血液、粘液、蛋白、脂肪、炭水化物などの落ちにくい汚れを短時間で分解して落とします。

②器具に優しい洗剤

素材に対する腐食性がなく、ほとんどの器具にご使用いただけます。内視鏡の金属、ゴム、波形チューブ、プラスチックなどにもダメージを与えることはありません。

③簡単なすすぎ

超低泡性ですのですすぎが簡単で排水の問題もありません。

※本製品には滅菌効果はありません。
※消毒剤との併用はできません。

●使用方法

浸漬洗浄の場合

使用濃度

インスルネットJET 50ccに対して温水または水6L(約0.8% 120倍)

浸漬時間

汚れが液状の場合：5分～10分
汚れが固形化している場合：30分以上

すすぎ

洗浄後、水道水・蒸留水・滅菌水等ですすぎます。

自動洗浄機の場合

(ウォッシャーディスインフエクターを除く)

使用濃度

洗浄1回ごとの使用量および洗浄時間は、それぞれ洗浄機メーカーの指定量および時間に合わせてご使用ください。

◆インスルネット5Lに使用できるプッシュポンプをご用意しています。ご希望の際は取扱店まで。