



Dissecting and Knotting Forceps MK-II

ナル ケ シキ

成毛式 D.K. フォーセプス15LV (結紮送り鉗子)
MK-II (マークII)

外周溝付き構造により、糸が脱落しづらく滑りおろしが可能な結紮器具

各部名称

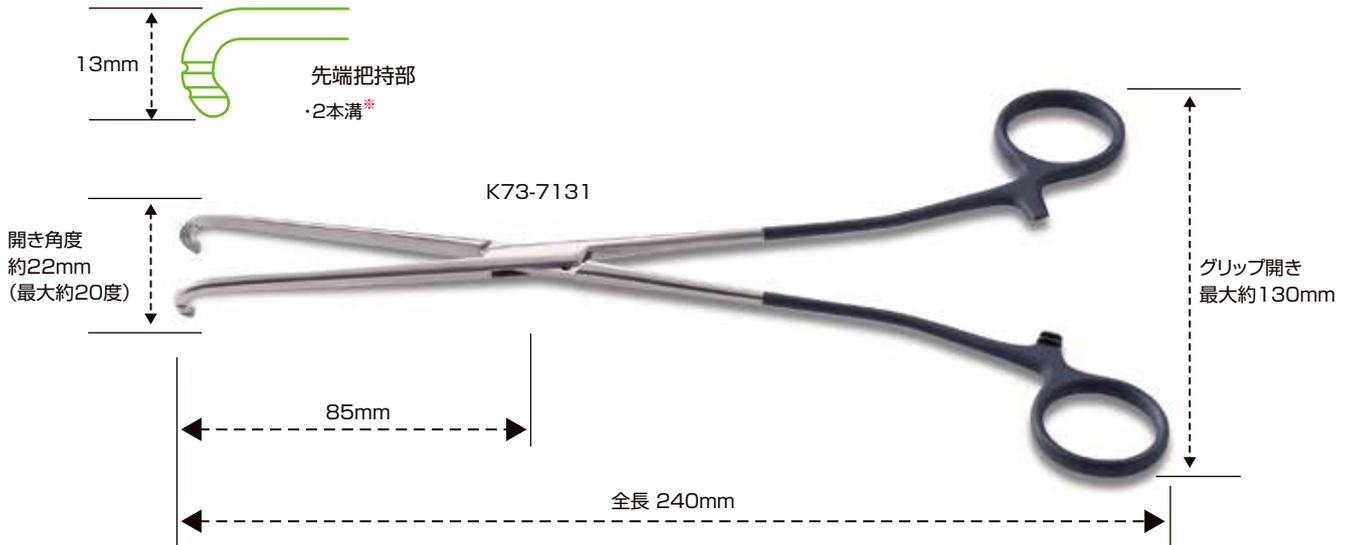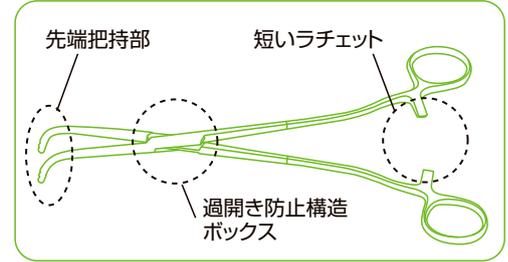


※2本溝の有用性は血管の太さにより使い分けられることです。


特徴

- 1) 先端把持部をUの字に丸く仕上げたことで、結紮時に先端が血管壁に当たらなくなりました。
- 2) 先端把持部が閉じてもラチェットのロックがかからない構造にすることで、操作性を高めました。
※強く握りこむことで、ラチェットをロックできます。
- 3) 鉗子の先端部の開きを約22mm(最大約20度)、グリップの開きを最大約130mmに制限しました。
操作中に万が一、片方の指がグリップから外れても先端が周囲の臓器を傷つせず、また簡単に持ち直すことができるようになりました。


■ D.K. フォーセプスの使用方法

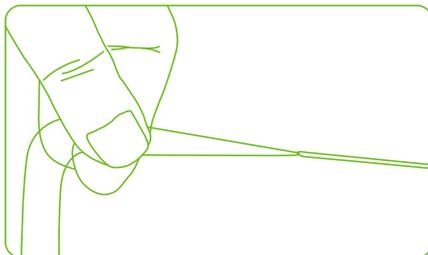

①糸を二等辺三角形に持つ。

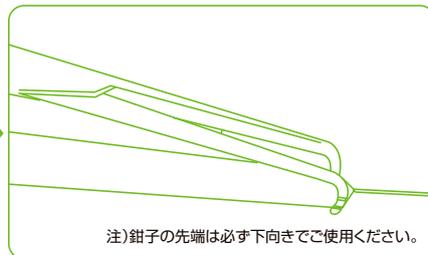

②2本の糸の間にD.K. フォーセプスを装着しやや広げ結紮を滑りおろす。
注) 鉗子の先端は必ず下向きでご利用ください。

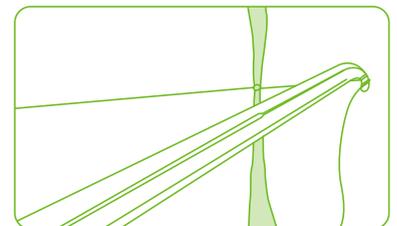

さらに確実な結紮にするために、上図のように締めこむこともできます。

製品名	製品番号	JANコード*	全長	標準小売価格(税別)	届出品目番号
成毛式 D.K. フォーセプス 15LV	K73-7131	4582105370777	240mm	¥95,000	11B2X00021700006

製造販売者
ケンツメディコ株式会社