

フレアーフォネット No.137Ⅱ KENZMEDICO

【禁忌・禁止】

「使用方法」

1. 本品は聴診専用ですので、生体音以外の音を聴かないで下さい。
2. 絶対に分解、改造しないで下さい。【故障等の原因になります。】
3. イヤピースが耳管に装着されていない場合は、使用しないで下さい。
〔耳管の金属部分で耳に傷をつけることがあります。〕
4. 本品を振り回さないで下さい。物的損傷及び人に傷害を加えたりする可能性があります。

※【形状・構造及び原理等】

本品は、チェストピース、チューブ耳管 ASSY (耳管、チューブ、イヤピース) で構成される。



チェストピースから聴取された音はチェストピース中心部に位置する音道を通りチューブ、耳管を通り左右の耳に送られます。

各部	原材料
チェストピース	ステンレス
ダイヤフラム	ガラスエポキシ
リング (付属品リング)	ポリウレタン (ポリエステル)
チューブ	PVC
イヤピース	シリコンゴム

【使用目的又は効果】

使用目的:生体音を聴き取る。

(注意) 正確に聴診をするためには、静かな場所で行なって下さい。

【使用方法】

1. 取扱上の注意に基づき、耳管の角度を調整して下さい。
2. 耳孔に合わせイヤピースを耳に装着して下さい。
3. チェストピースのダイヤフラム面又はベル面を聞きたい面に合わせ静かに生体音の聴取を行って下さい。

【使用上の注意】

1. チェストピース (ダイヤフラム面) を叩かないで下さい。ダイヤフラムを傷めたり耳管を装着している場合に耳に障害をきたす可能性があります。
2. 性能を十分に活用するためにリング、イヤピースの取付けが緩んでいないか確認して下さい。緩んでいる場合は確実に装着して下さい。
3. ダイヤフラム、リング、イヤピース等に傷がある場合は使用しないで下さい。皮膚を傷つける可能性があります。
4. 耳管、チューブ、チェストピースの音道の中に異物が入らないよう留意して下さい。故障の原因になります。

【保管方法及び使用期間等】

「保管方法」

1. 保管温度 -20~60°C 湿度 RH85%以下

2. 保管状態

●急激な温度変化のある所、極度に高温や低温になる所、湿度の高い所、直射日光の当たる所、ほこりの多い所、化学薬品の保管場所やガスの発生する所を避けて下さい。

●チューブを折り曲げたまま長時間放置しないで下さい。チューブの寿命が短くなります


「使用期間」

チェストピース、チューブ 5年間 (当社 データによる)

【取扱上の注意】

(チューブ耳管 ASSY)

1. 耳管のバネが折れた場合、聴診上の不都合が生じたり、人体に傷害を加える可能性があります。
2. 耳管を無理に広げたり、握りつぶしたりしないで下さい。
3. 耳管は左下図のように回すことが出来ます。イヤピースの穴を耳孔で塞がないように耳孔の方向に合うように調整して下さい。(標準的の角度:18度)

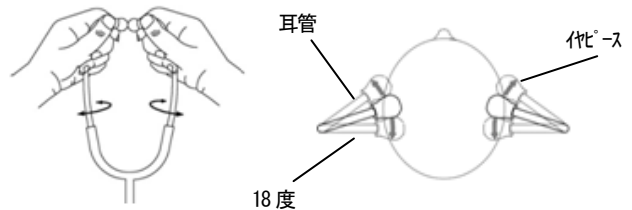

(イヤピース)

1. イヤピースが外れた状態で装着しないでください。

●装着状態




●外れた状態



イヤピース着脱方法の詳細は取扱説明書を参照して下さい。(サスペンデッドダイヤフラム)

1. サスペンデッドダイヤフラムの取り外し方

チェストピース本体とダイヤフラム外周リング部の接続部分から外周へめくるように外します。

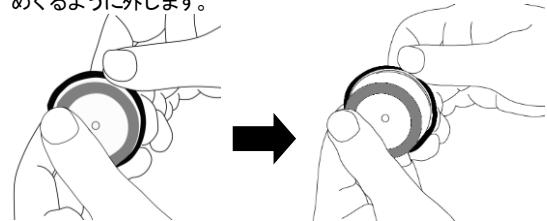

詳細は取扱説明書を参照して下さい。

【保守・点検に係る事項】

1. チューブは皮脂等の影響で硬化が促進されます。保管条件によっては1年間程度のご使用でチューブが硬くなる場合がありますので、ご使用後は付着物をよく拭き取って下さい。
2. 本器が汚れた時は、柔らかい布でからぶきをして下さい。汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤をつけた布で汚れを落とした後、からぶきして下さい。
3. 故障したときは、お買い求めの販売店にご連絡下さい。

【製造販売業者および製造業者の氏名または名称および住所】

(製造販売業者及び製造業者)

ケンツメディコ株式会社

〒367-0206 埼玉県本庄市児玉町共栄 552 番地 1

TEL 0495-71-1001 FAX 0495-72-6716

URL <http://www.kenzmedico.co.jp>