

ドクターフォネット ネオ No.188 II


【禁忌・禁止】

「使用方法」

1. 本品は聴診専用ですので、生体音以外の音を聴かないで下さい。
2. 絶対に分解、改造しないで下さい。【故障等の原因になります。】
3. イヤピースが耳管に装着されていない場合は、使用しないで下さい。
〔耳管の金属部分で耳に傷をつけることがあります。〕
4. 本品を振り回さないで下さい。物的損傷及び人に傷害を加えたりする可能性があります。

* 【形状・構造及び原理等】

本品は、チェストピース、チューブ、耳管 ASSY (パネ、耳管、イヤピース) で構成されます。

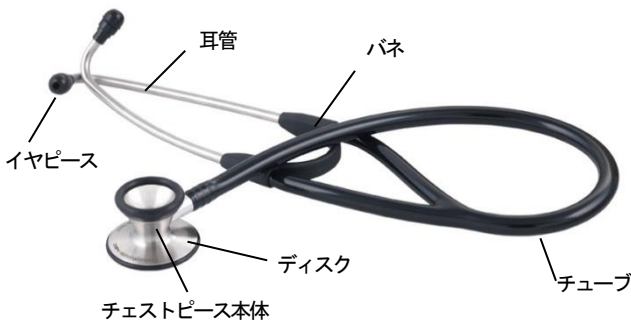

チェストピースから聴取された音はチェストピース中心部に位置する音道を通りチューブ、耳管 ASSY を通り左右の耳に送られます。

各部	原材料
チェストピース、ディスク	ステンレス
サスペンデット型ダイアフラム	ポリウレタン樹脂+ガラスエポキシ樹脂
耳管	ステンレス
パネ	ポリエステル樹脂
チューブ	PVC
イヤピース	シリコンゴム
リング (付属品)	ポリアセタール樹脂
ダイアフラム (付属品)	ガラスエポキシ樹脂

【使用目的又は効果】

使用目的:生体音を聴き取る。

(注意) 正確に聴診をするためには、静かな場所で行なって下さい。

* 【使用方法】

1. 取扱上の注意に基づき、耳管の角度を調整して下さい。
2. 耳孔に合わせイヤピースを耳に装着して下さい。
3. チェストピースのダイアフラム面又はベル面を選択して生体音の聴取を行って下さい。

* 【使用上の注意】

1. チェストピース (ダイアフラム面) を叩かないで下さい。ダイアフラムを傷めたり耳管を装着している場合は耳に障害をきたす可能性があります。
2. 性能を十分に活用するために各パーツの取付けが緩んでいないことを確認して下さい。緩んでいる場合は確実に装着して下さい。
3. ダイアフラム、リング、イヤピース等に傷がある場合は使用しないで下さい。皮膚を傷つける可能性があります。
4. 耳管パイプ、チューブ、チェストピースの音道の中に異物が入らないよう留意して下さい。故障の原因になります。

取扱説明書を必ずご参照ください

* 【保管方法及び使用期間等】

「保管方法」

1. 保管温度 -20~60°C 湿度 RH85%以下
2. 保管状態
 - 急激な温度変化のある所、極度に高温や低温になる所、湿度の高い所、直射日光の当たる所、ほこりの多い所、化学薬品の保管場所やガスの発生する所を避けて下さい。
 - チューブを折り曲げたまま長時間放置しないで下さい。チューブ寿命が短くなります。


「使用期間」

チェストピース、耳管 ASSY 5年間 (当社 データによる)

【取扱上の注意】

(耳管 ASSY)

1. パネが折れた場合、聴診上の不都合が生じたり、人体に傷害を加える可能性があります。
2. 耳管を無理に広げたり、握りつぶしたりしないで下さい。
3. 耳管は下図のように回すことが出来ます。イヤピースの穴を耳肌で塞がないように耳孔の方向に合うように調節して下さい。(標準角度:約18度)

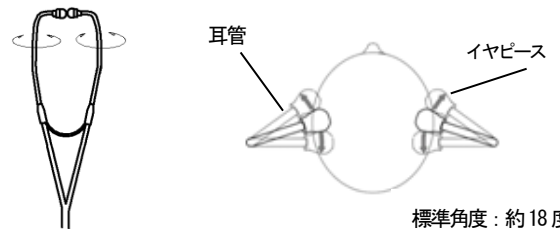

(イヤピース)

1. イヤピースが外れた状態で装着しないでください。

●装着状態




●外れた状態




(ディスクの着脱方法)

1. ディスク全体を軽くつかみ回転させてチェストピース本体と着脱して下さい。

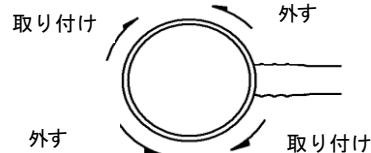

2. 用途に合わせてディスクを交換してご使用ください。

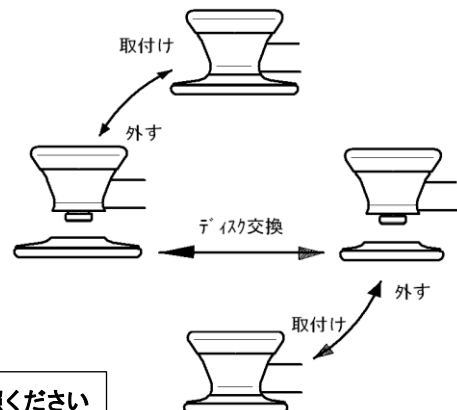


(小児用ベルの装着方法)

小児用ベルはチェストピースのベルに図のように挿入して下さい。

小児用ベルの溝にカバーリングが嵌合し固定されます。

(カバーリングが磨耗、材質劣化している場合は固定されない場合があります。)

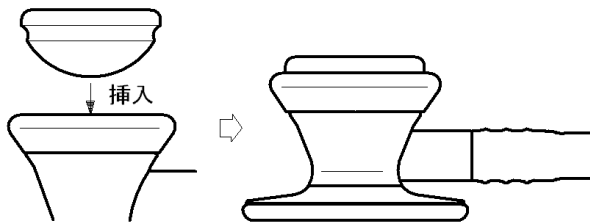

【保守・点検に係る事項】

1. チューブは皮脂等の影響で硬化が促進されます。
保管条件によっては1年程度のご使用でチューブが硬くなる場合がありますので、ご使用後は付着物をよく拭き取って下さい。
2. 本器が汚れた時は、柔らかい布でからぶきして下さい。
汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤をつけた布で汚れを落とした後、からぶきして下さい。
3. 故障したときは、お買い求めの販売店にご連絡下さい。

【製造販売業者および製造業者の氏名または名称および住所】

(製造販売業者及び製造業者)

ケンツメディコ株式会社

〒367-0206 埼玉県本庄市児玉町共栄 552 番地 1

TEL 0495-71-1001 FAX 0495-72-6716

URL <http://www.kenzmedico.co.jp>