



Doctorphonette NEO II

■主な仕様

品名:ドクターフォネットネオNo.188 II
全長:約710mm
重量:約200g
サスペンデッド型ダイヤフラム面径:成人用/約φ48mm 小児用/約φ40mm
スタンダード型ダイヤフラム面径:成人用/約φ49mm 小児用/約φ40mm
ベル面径:成人用/約φ37mm 小児用/約φ30mm
製造販売届出番号:11B2X00021188201

※仕様は改良のため予告なく変更させていただく場合がございます。
 ※全長・重量には多少の増減がございます。
 ※本体の保証は1年となっております。バネ部分の保証は10年となっております。

別売品/補充品	品名	品番	希望小売価格	対応カラー															
				ブラック	ネイビーブルー	バーガンディ	ダークネイビー	ハンターグリーン	チョコレイト	パールピンク	ダイヤフラム	ブラックエディション							
ディスクセット	サスペンデッド型ディスクセット ブラック M 成人用	1188F111	¥8,000	○															
	サスペンデッド型ディスクセット ブラック S 小児用	1188F115	¥8,000	○															
	サスペンデッド型ディスクセット グレー M 成人用	1188F112	¥8,000		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
	サスペンデッド型ディスクセット グレー S 小児用	1188F116	¥8,000		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
	サスペンデッド型ディスクセット BE M 成人用	1188F113	¥9,000															○	
	サスペンデッド型ディスクセット BE S 小児用	1188F117	¥9,000																○
	スタンダード型ディスクセット ブラック M 成人用	1188F121	¥8,000	○															
	スタンダード型ディスクセット ブラック S 小児用	1188F125	¥8,000	○															
	スタンダード型ディスクセット グレー M 成人用	1188F122	¥8,000		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	スタンダード型ディスクセット グレー S 小児用	1188F126	¥8,000		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スタンダード型ディスクセット BE M 成人用	1188F123	¥9,000																○	
スタンダード型ディスクセット BE S 小児用	1188F127	¥9,000																○	
ダイヤフラム	サスペンデッド型ダイヤフラム ブラック M 成人用	1137D011	¥1,800	○															
	サスペンデッド型ダイヤフラム ブラック S 小児用	1137D021	¥1,800	○															
	サスペンデッド型ダイヤフラム グレー M 成人用	1137D012	¥1,800		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	サスペンデッド型ダイヤフラム グレー S 小児用	1137D022	¥1,800		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	スタンダード型ダイヤフラム ブラック M 成人用	1188D041	¥1,000	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
スタンダード型ダイヤフラム ブラック S 小児用	1188D042	¥1,000	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ノンチルリング	ステレオ用ノンチルリング ブラック	1178B001	¥1,500	○														○	
	ドクター用小児用ノンチルリング ブラック	1138B081	¥1,500	○														○	
	ステレオ用ノンチルリング グレー	1178B002	¥1,500		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ベルカバー	チタスコープ181用カバーリング 黒	1181B011	¥800	○														○	
	カバーリング188 グレー	1181B012	¥800		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ベル面パーツ	小児用ベル188 ブラック	1188D051	¥2,000	○														○	
	小児用ベル188 グレー	1188D052	¥2,000		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
イヤピース	4ヶ入/セット	ソフトイヤピースセット ブラック(大小)	1138F511	¥1,200	○													○	
		ソフトイヤピースセット グレー(大小)	1138F512	¥1,200		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	2ヶ入/セット	シーリングチップ(大)ケース入り マットブラック 6φ	0137B551	¥1,200	○													○	
		シーリングチップ(大)ケース入り マットグレー 6φ	0137B552	¥1,200		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	2ヶ入/セット	シーリングチップ(小)ケース入り マットブラック 6φ	0137B621	¥1,200	○													○	
		シーリングチップ(小)ケース入り マットグレー 6φ	0137B622	¥1,200		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

製造販売業者
ケンツメディコ株式会社

本社 〒367-0206 埼玉県本庄市児玉町共栄552-1
 TEL(0495)71-1001 FAX(0495)72-6716
 ホームページ <http://www.kenzmedico.co.jp>



高級ステンレス聴診器

ドクターフォネットネオII

No.188II KENZMEDICO

Doctorphonette NEO II

世界標準を超えた、Made in Japan聴診器

チェンジャブル・ディスクという新たな聴診スタイル




KENZMEDICO

Made in Japan ケンツメディコ聴診器の“こだわり”



サスペンデッド型ダイアフラム

チェストピースをあてる力加減によって、低周波音(低音)の聴診にも高周波音(中高音)の聴診にも切替え可能

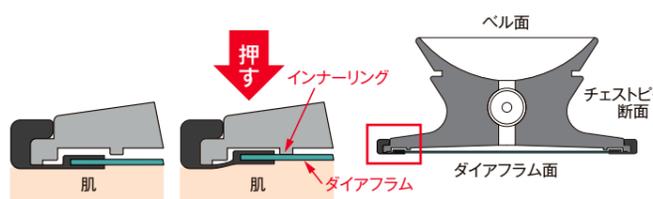

小児用チェンジャブル


ダイヤフラム面をディスク小に交換し、ベル面に小児用ベルをはめ込むことで、小児用聴診器に変換可能。




スタンダード型ダイアフラム

高周波音聴診に特化した性能
-呼吸器領域聴診優位-

硬質のダイアフラムが低周波音(低音)を抑えることで、高周波音(中高音)の微小な異常音をクリアに聴診できます(ローカットハイパス構造)。

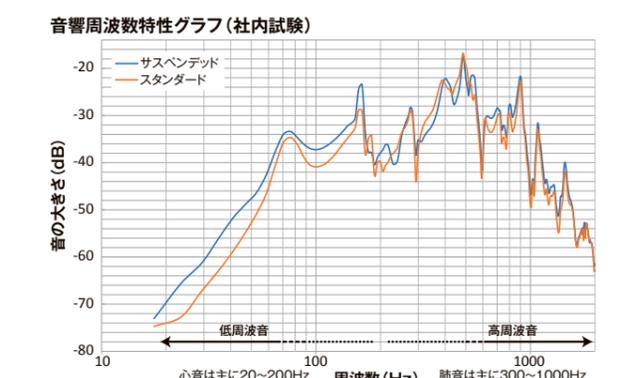

スタンダード型ダイアフラムでは、低周波音(低音)が抑えられることにより高周波音(中高音)が鮮明に聴こえる。

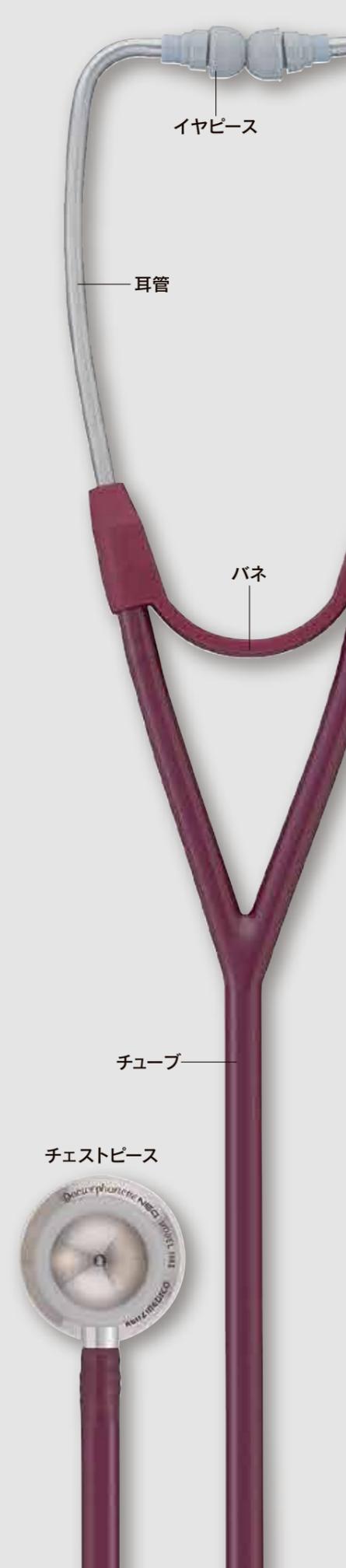


優しくサポートするための機能

選べるイヤピース

2種×2サイズのイヤピースが付属されており、自分の耳孔に合うイヤピースを選択して使用できる。

回転ソフトイヤピース

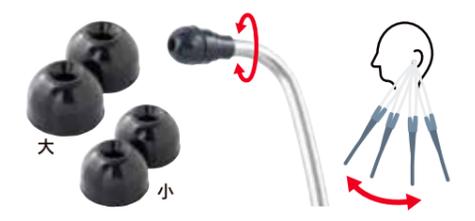

回転式にすることで、耳孔にイヤピースがフィットしたまま耳管が回転。耳孔の摩擦を軽減。


シーリングチップ



より柔らかいシーリングチップは、耳孔の形に馴染みやすく、遮断性が向上。
※固定式のイヤピースです。

可動式の耳管

耳管は角度調整が可能。耳孔に確実にフィットさせることで、音を逃さず、快適な装着感。

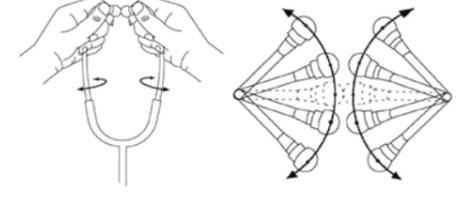

バネ

日本の焼入れ技術が生かされた丈夫でしなやかなバネ。長時間の装着でも耳孔に負担をかけないように圧着加減を調整可能。

優れた音響を実現

オールステンレス製

チェストピース・耳管の素材には、音響特性の優れたステンレスを使用。

ツインワンチューブ

音が干渉し合わず、音の減衰が少ないツインワンチューブを採用。



希望小売価格 ¥38,500(税別)

付属品

- ①スタンダード型ディスクセット M 成人用
- ②サスペンデッド型ディスクセット S 小児用
- ③スタンダード型ディスクセット S 小児用
- ④小児用ベル
- ⑤ソフトイヤピース(大) 1セット
- ⑥ソフトイヤピース(小) 1セット
- ⑦シーリングチップ(大) 1セット
- ⑧シーリングチップ(小) 1セット

