



高級ライトウェイト聴診器

ドクターフォネット ライト

No.185 KENZMEDICO

Doctorphonette light

ドクター向け軽量タイプ
ダイヤフラム×ダイヤフラム 両面搭載
〈成人用〉 〈小児用〉



KENZMEDICO

軽いから使いやすい。軽いのに音がいい。



クラス最軽量 ※約150g

アルミ素材を使用し、軽量化しました。
使用時も持ち運びも、快適にご使用いただけます。

成人から小児まで幅広く聴診

成人用と小児用のサスペンデッド型ダイアフラムを両面に標準装備しました。
患者様の体格に応じて使い分けができます。

サスペンデッド型ダイアフラム

同一面で低周波音(低音)から高周波音(中高音)の聴診が可能です。

成人用ダイアフラム(振動板)面は、高周波音(中高音)の聴診に特化したスタンダード型ダイアフラムを取り付けることもできます。

小児用ダイアフラム(振動板)面は、付属のベルカバーを利用することで、従来型のベル面として使用できます。



軽くあてると低周波音(低音)



強くあてると高周波音(中高音)



スタンダード型ダイアフラム装着例

ベルカバー装着例

優しくサポートするための機能

選んで使えるイヤピース

4種類のイヤピースを付属しております。ご自分に合うイヤピースに付け換えて、ご使用いただけます。

回転ソフトイヤピース(大・小)

回転式の土台にソフトイヤピースを付属します。これにより、聴診器を装着したときにイヤピースがフィットしたまま耳管が回転しますので、耳孔での摩擦が起りにくい構造です。

シーリングチップ(大・小)

より軟らかいシーリングチップは、耳孔の形に馴染みやすく、遮音性が向上します。


可動式の耳管

耳管は角度調節が可能。耳孔に確実にフィットさせることで、音を逃さず快適にご使用いただけます。


丈夫でしなやかなバネ

長時間の装着でも耳孔に負担をかけないように圧着加減が調節可能なバネです。
※万が一のバネ折れには10年間保証

回転式のソフトイヤピース

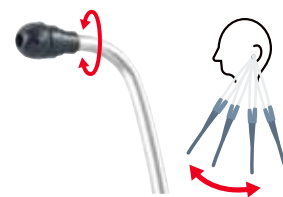

耳管の角度調節

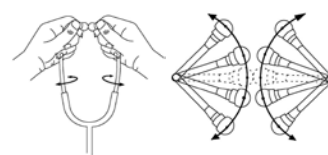

- ブラック 品番0185B001
- パーガンディ 品番0185B002
- ネイビーブルー 品番0185B003
- チョコレート 品番0185B004
- ハンターグリーン 品番0185B005
- ダークネイビー 品番0185B006
- パールピンク 品番0185B007
- パールプラム 品番0185B008

■主な製品仕様

品名:ドクターフォネット ライト No.185
全長:約710mm
重量:約150g
サスペンデッド型ダイアフラム面径:M成人用/約Φ48mm
SS小児用/約Φ36mm
チェストピース:アルミニウム(アルマイト)
耳管:アルミニウム(アルマイト)
製造販売届出番号:11B2X00021185001
希望小売価格(税別):¥33,000

■標準付属品

スタンダード型ダイアフラム M 成人用
抗菌リング
カバーリング181
ソフトイヤピース(大小)
シーリングチップ(大小) 6Φ

別売品/補充品	品名	品番	希望小売価格(税別)	対応品								
				ブラック	パーガンディ	ネイビーブルー	チョコレート	ハンターグリーン	ダークネイビー	パールピンク	パールプラム	
ダイアフラム	サスペンデッド型ダイアフラム ブラック M 成人用	1137D011	¥1,800	○								
	サスペンデッド型ダイアフラム グレー M 成人用	1137D012	¥1,800	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	サスペンデッド型ダイアフラム ブラック SS 小児用	1137D028	¥1,800	○								
	サスペンデッド型ダイアフラム グレー SS 小児用	1137D029	¥1,800	○	○	○	○	○	○	○	○	○
リング	抗菌リング ブラック	1110F801	¥1,400	○								
	抗菌リング タークグレー	1110F802	¥1,400	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ベルカバー	カバーリング181 ブラック	1181F801	¥800	○								
	カバーリング181 タークグレー	1181F802	¥800	○	○	○	○	○	○	○	○	○
イヤピース	ソフトイヤピースセット ブラック(大小)	1138F511	¥1,200	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ソフトイヤピースセット タークグレー(大小)	1138F513	¥1,200	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	シーリングチップ(大)ケース入り マットブラック 6Φ	0137B551	¥1,200	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	シーリングチップ(大)ケース入り マットグレー 6Φ	0137B552	¥1,200	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	シーリングチップ(小)ケース入り マットブラック 6Φ	0137B621	¥1,200	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	シーリングチップ(小)ケース入り マットグレー 6Φ	0137B622	¥1,200	○	○	○	○	○	○	○	○	○

■その他のパーツについてはWEBでご確認ください。

■製品の仕様は改良のため予告なく変更させていただく場合があります。 ■全長、重量については多少の増減があります。 ■本体の保証は1年となっております。

製造販売業者

ケンツメディコ株式会社

本社 〒367-0206 埼玉県本庄市児玉町共栄552-1
TEL(0495)71-1001 FAX(0495)72-6716
ホームページ <http://www.kenzmedico.co.jp>